

checkToP®

1000 mIU/mL

ÚVOD

Test **checkToP®** není klasický těhotenský test. Jedná se o rychlý test s nízkou citlivostí určený k domácímu použití pro sebetestování, který slouží ke stanovení hladiny hCG (lidského choriového gonadotropinu) v moči. Používá se ke stanovení výsledku po předchozím ukončení nitroděložního těhotenství až do 9 týdnů od nástupu amenorey a nebo po spontánním potratu.

To, zda a jak máte tento test použít, vám vysvětlí váš lékař.

OBSAH


Ref. 3066-1000AI: Každé balení obsahuje jeden (1) návod k použití a jeden (1) test **checkToP®** zabalený v hermeticky uzavřeném aluminiovém sáčku obsahujícím jeden sáček s desikantem (hydrofobická látka zajišťující vysušení).

Ref. 3067-1000AI: Každé balení obsahuje dvacet (20) návodů k použití a dvacet (20) testů **checkToP®** zabalených v hermeticky uzavřeném aluminiovém sáčku obsahujícím jeden sáček s desikantem (hydrofobická látka zajišťující vysušení).

PRINCIP TESTU

Test **checkToP®** je rychlý kvalitativní test ke stanovení přítomnosti hCG v moči. Umožňuje zjistit hladinu hCG 1000 mIU/ml nebo vyšší během 5 až 10 minut.

Je-li hladina hCG nižší než 1000 mIU/ml, zobrazí se pouze jeden barevný proužek v kontrolním okénku, ale žádný barevný proužek v testovacím okénku. Je-li hladina hCG vyšší než 1000 mIU/ml, zobrazí se dva barevné proužky, vždy jeden v každém okénku.

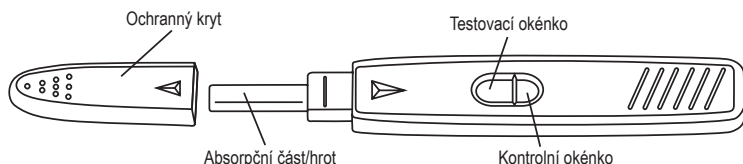

OPATŘENÍ



1. Tento test je určen výhradně pro vnější použití (pro diagnostiku in vitro). Vyvarujte se jeho požití.
2. Před provedením testu si pozorně přečtěte návod. Test není spolehlivý, není-li návod přesně dodržen.
3. Uchovávejte při teplotě +4°C až +30°C. **Nesmí zmraznout.**
4. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti. Datum použitelnosti je vytištěno na každém aluminiovém sáčku, a také na vnějším obalu. Pokud je aluminiový sáček poškozen, test nelze použít.
5. Test **checkToP®** je určen k jednorázovému použití.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Po použití vyhodte všechny komponenty soupravy do domácího odpadu.

POSTUP

Test se provádí v době, kterou vám sdělí gynekolog, obvykle 10 až 20 dnů po ukončení těhotenství:

- po prvním užití léku v rámci „Medical ToP“ (farmakologického ukončení těhotenství ve zdravotnickém zařízení) až do 9 týdnů od nástupu amenorey nebo po spontánním potratu.

1. Vyjměte testovací zdravotnický prostředek **checkToP®** ze sáčku z aluminiové fólie. Malý sáček vyhodte.
2. Sejměte ochranný kryt a zvolte jednu z následujících metod:

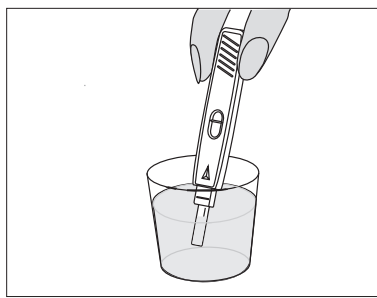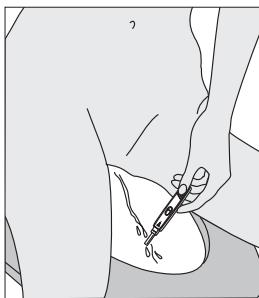


- přidržete absorpční část/hrot přímo v proudu moči po dobu 5-10 sekund. **Dávejte pozor, aby nedošlo k vniknutí moči do testovacího okénka.**
 - nebo moč odeberte do čisté a suché nádoby a absorpční část/hrot do moči ponořte nejméně na 5 až 10 sekund, aby došlo k jejímu úplnému nasáknutí.
3. Na absorpční část/hrot testovacího zdravotnického prostředku **nasadte zpět ochranný kryt.**
 4. Položte testovací zdravotnický prostředek na suchý, rovný povrch tak, aby obě okénka byla otočena směrem nahoru. Výsledky se v okénkách zobrazí a lze je odečíst po 5 až 10 minutách. Po uplynutí 10 minut již výsledky neodečítejte.

VÝKLAD VÝLEDKU

Před odečtením výsledku testu počkejte 5 až 10 minut. Do 5 až 10 minut se v kontrolním (menším) okénku zobrazí čárka.

Důležité: Výsledek neodečítejte dříve, než uplynulo 5 minut, avšak ne později než po 10 minutách.

Pozitivní výsledek testu:

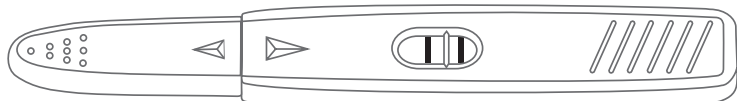


Jestliže se do 10 minut objeví dva růžové proužky: jeden proužek v testovacím okénku a jeden v kontrolním okénku, je test pozitivní. Hladina hCG může být vyšší než 1000 mIU/ml. To by mohlo znamenat, že ošetření za účelem ukončení těhotenství nebylo úspěšné nebo není dokončeno, nebo že nedošlo ke spontánnímu potratu. **V každém případě je potřeba se poradit s gynekologem.**

Test k ověření výsledku ukončení těhotenství pro sebetestování až do 9 týdnů od nástupu amenorey nebo po spontánním potratu

Pro měření hladiny hCG nad 1000 mIU/ml


Pozn.: Jeden z proužků může být tmavší. Oba proužky mohou mít libovolný odstín růžové a testovací proužek může být světlejší nebo tmavší než kontrolní. V každém případě by nicméně měly být vidět dva zřetelné, rovnoběžné proužky.

Negativní výsledek testu:

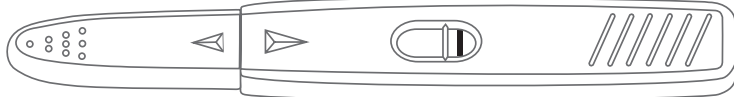

Pokud se zobrazí pouze jeden růžový proužek v kontrolním (menším) okénku a žádný proužek v testovacím (větším) okénku, je test negativní. To znamená potvrzení ukončení těhotenství nebo spontánního potratu.

Neprůkazný výsledek:

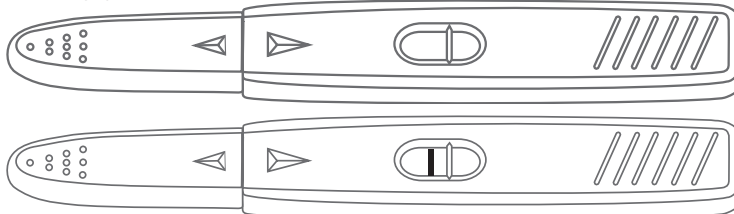

Jestliže se v kontrolním okénku testu nezobrazí žádný barevný proužek, je výsledek neprůkazný. I v případě, že se v testovacím okénku zobrazí barevný proužek, doporučujeme test zopakovat za použití nového testovacího prostředku **checkToP®** a pro druhý test použít čerstvý vzorek moči získaný po 24 hodinách od provedení neprůkazného testu.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak test **checkToP® funguje?**

Po otěhotnění organismus ženy začne produkovat hormon, který se nazývá lidský choriový gonadotropin (hCG). Tento hormon se vylučuje močí a jeho koncentrace postupem času stoupá. Test **checkToP®** umožňuje zjistit přítomnost hormonu hCG v moči, pokud je jeho hladina 1000 mIU/ml nebo vyšší. Pokud bylo ošetření za účelem ukončení těhotenství úspěšné, nebo pokud došlo ke spontánnímu potratu, měla by hladina hCG poklesnout pod 1000 mIU/ml do 10 až 20 dnů. Test **checkToP®** neumožňuje stanovit hladinu hCG nižší než 1000 mIU/ml, při níž klasické těhotenské testy ukáží pozitivní výsledek.

Má se test provádět v nějakou konkrétní denní dobu?

Ano, doporučujeme provést test **checkToP®** za použití první ranní moči, která by měla být více koncentrovaná.

Bude mít na výsledek vliv objem tekutin, které jsem vypila?

Ano, vysoký příjem tekutin může moč ředit a stanovení hCG tak může ztížit. Nedoporučuje se tudíž abnormální příjem tekutin.

Co mám dělat, pokud si nejsem ohledně výsledku testu jistá?

Pokud nedokážete určit, zda se v oválném testovacím okénku nachází čárka, nebo ne, test po uplynutí jednoho dne zopakujte pomocí nového testovacího prostředku **checkToP®**. Při dodržení návodu byste měla získat přesné výsledky. K falešně pozitivnímu výsledku mohou vést určité léky, které obsahují hCG, nebo které se používají v kombinaci s hCG (např. Pregnyl, Porfasi, Pergonal), a také některé vzácné zdravotní potíže. Na výsledek testu by neměl mít vliv alkohol, antibiotika, antikoncepční pilulky, hormonální léčba obsahující klomifen-citrát (např. Clomid, Serophen) či léky proti bolesti.

Nechala jsem absorpční část/hrot v moči déle než 10 sekund. Získám i přesto správný výsledek?

Ano. Pár sekund navíc nebude mít na výsledky vliv.

Nechala jsem absorpční část/hrot v moči méně než 5 sekund. Získám i přesto správný výsledek?

Ne, protože objem vzorku moči může být příliš nízký.

Co znamená, je-li čárka v testovacím okénku tmavší než čárka v kontrolním okénku, nebo je-li naopak čárka v testovacím okénku světlejší než v kontrolním okénku?

Pokud vidíte čárku v každém okénku, je výsledek testu pozitivní.

Co mám dělat, až výsledek zjistím?

Je třeba postupovat podle doporučení od lékařů, kteří zajišťují vaši péči.

Co když před odečtením výsledku testu nepočkám celých 5 minut?

Jestliže výsledek testu odečtete dříve než po 5 minutách, nemusí být test ještě dokončen a výsledek nemusí být přesný. Pokud již uplynulo 10 minut od kontaktu absorpční části/hrotu s močí, výsledky **NELZE** INTERPRETOVAT.

Jak je test přesný?

Test **checkToP®** je velmi přesný a zdravotnický personál v nemocnicích či laboratořích jej používá k ověření úspěšnosti ukončení těhotenství až do 9 týdnů od nástupu amenorey. Ze zpráv o hodnocení vyplývá, že test **checkToP®** je schopen zjistit hladinu hCG vyšší než 1000 mIU/ml ve více než 99% případů. Žádný test ovšem není dokonalý, a i když bude výsledek negativní, je třeba se i přesto spojit s lékařem, pokud budete mít příznaky těhotenství, jako je mírné krvácení, nedostavení se menstruace v očekávaném termínu, citlivost prsou, pocit nevolnosti a růst břicha.

Mohu test **checkToP® použít pro diagnózu těhotenství?**

Ano, ale test **checkToP®** není schopen zjistit velmi časně stádium těhotenství a je pozitivní pouze v případě, že hladina hormonu hCG je vyšší než 1000 mIU/ml. Jiné těhotenské testy jsou citlivější a ukazují pozitivní výsledek již od hladiny hCG 5 až 25 mIU/ml.

UPOZORNĚNÍ

- Test **checkToP®** nelze použít v případě těhotenství, kdy byla počáteční hladina hCG nižší než 1000 mIU/ml.
- Test **checkToP®** používejte pouze jako součást léčby, kterou vám předepsal ošetřující lékař. Klinickou interpretaci testu je nutno provádět společně se zdravotníky, kteří zajišťují vaši péči, nebo podle jejich pokynů.

Distributor pro ČR:
NORDIC Pharma, s.r.o. – na základě licence EXELGYN
Informace o výrobku: info@nordicpharma.cz / +420 241 080 770

Výrobce:
VEDA.LAB
Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cerisé B.P.181
61006 ALENCON Cedex, Francie

	Čtěte návod k použití
	Diagnostický zdravotnický prostředek <i>in vitro</i>
	Číslo šarže
	Nepoužívat opakovaně
	Výrobce
	Datum použitelnosti
	Uchovávejte při teplotě +4°C až +30°C



HCG-MAP-602001

2015/12